


Matériaux

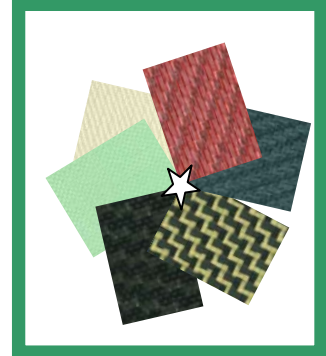

HEKAPUR H400 Nouveauté




- * RESULTAT IMPECCABLE
- * FACILE A TRAVAILLER
- * FAIBLE ODEUR
- * ECONOMIE



Descriptif :

HEKAPUR H400 est une MOUSSE POLYURETHANE, DURE expansée mise au point pour l'élaboration des formes en podo-orthèse mais aussi pour diverses applications en ortho-prothèse.

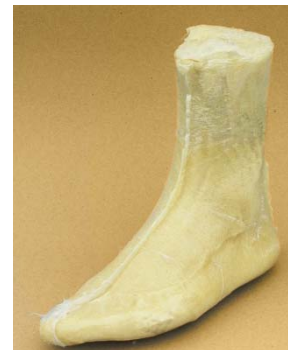

Propriétés :

La particularité d' **HEKAPUR H400** réside en l'expansion très lente du mélange des composants A et B. Cette réaction chimique génère de toutes petites bulles, ce qui augmente considérablement la résistance du Pédilène face aux contraintes qui lui sont infligées, tout en conservant sa légèreté.

HEKAPUR H400 est beaucoup plus légère qu'un Pédilène classique 700 avec des propriétés mécaniques similaires.

Avantages :

<p>Faible densité pour une forte résistance</p>	<p>Economie d'environ 20% grâce à son facteur d'expansion = 2,8% (autres Pédilène = 2%)</p>	<p>Dégage une très faible odeur</p>
<p>Gain de temps pour mélanger les composants A et B avant réaction chimique</p>	<p>Surface du positif démoulé beaucoup plus lisse (petites bulles)</p>	<p>Agrafage facile</p>

Nouveauté HEKAPUR H400




◆ Mode de fabrication :

◆ Pour une production importante :

HEKAPUR H400 peut être versé dans le positif préalablement isolé avec du latex et son agent de démoulage

◆ Pour une petite production ou une coulée « express » :

Scier la forme en deux parties qui seront chacune isolées à l'aide du film Exact-Film 101, réassembler les deux parties et les solidariser fermement avec du scotch d'emballage, puis verser HEKAPUR H400 préalablement mélangé à l'aide du pot mélangeur spécial. Démouler.

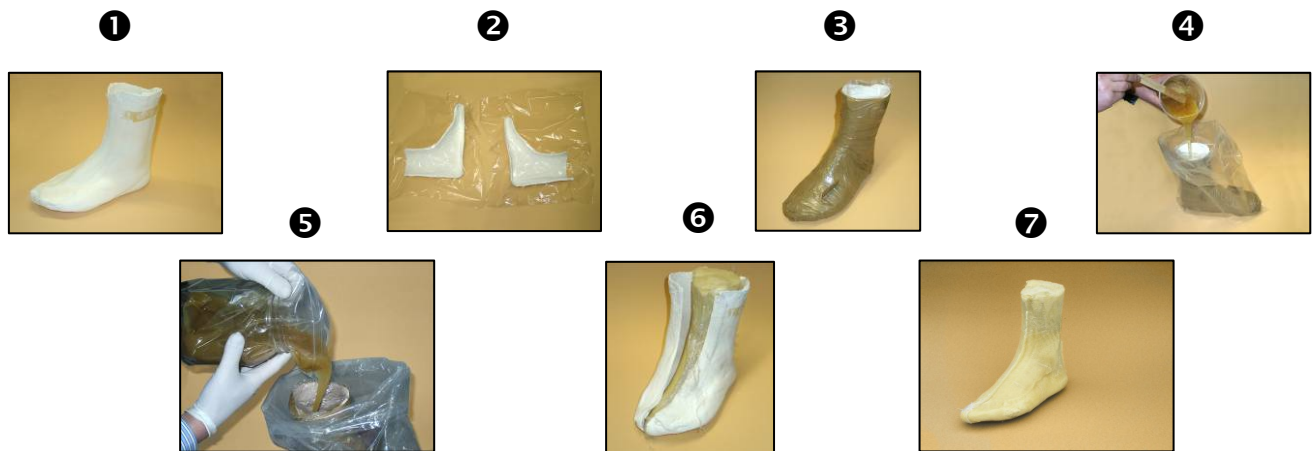

◆ Conseils d'utilisation :



□ HEKAPUR H400 peut être mélangé avec un mélangeur traditionnel pour d'importantes quantités.

□ Pour un mélange optimal, utiliser le pot mélangeur spécial avec sac plastique pour un mélange jusqu'à 2L.

HEKAPUR H400 Nouveauté



Indications des quantités par volume :

Volume à remplir (cm ³)	Quantité HEKAPUR H400 A+B (g)	Quantité HEKAPUR H400A (g)	Quantité HEKAPUR H400A (g)
100	56	28	28
200	112	56	56
300	168	84	84
400	224	112	112
500	280	140	140
600	336	168	168
700	392	196	196
800	448	224	224
900	504	252	252
1000	560	280	280
1100	616	308	308
1200	672	336	336
1300	728	364	364
1400	784	392	392
1500	840	420	420
1600	896	448	448
1700	952	476	476
1800	1008	504	504
1900	1064	532	532
2000	1120	560	560
2100	1176	588	588
2200	1232	616	616
2300	1288	644	644
2400	1344	672	672
2500	1400	700	700
2600	1456	728	728
2700	1512	756	756
2800	1568	784	784
2900	1624	812	812
3000	1680	840	840



www.neut.fr

POUR TOUTE COMMANDE,

merci de contacter notre **service commandes et expéditions**:

par téléphone : 03 25 76 10 10
par fax : 03 25 76 12 10
par mail : commande@neut.fr

Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,

Merci de contacter la **direction commerciale** :

par téléphone : 01 42 33 83 46
par fax : 01 42 33 58 99
par mail : ortho@neut.fr

Du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00